

TOPCOM®



WG-2490

Cântarul electronic WG-2490 pentru bebeluși a fost conceput pentru a ține evidența creșterii bebelușului Dvs., pentru porționarea exactă și demnă de încredere a cantității de lapte asimilate la fiecare masă. Funcția TARE vă permite să cântăriți bebelușul folosind o haină sau un prosop moale. Cântărind până la 20 kg și cu diviziune de 10 g cântarul vă va ajuta totodată să țineți evidența progreselor copilului Dvs.

Produsul este conform cu standardele de calitate și reglementările directivei europene 2004/108/EC

Made in China

ESTE IMPORTANT SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ȘI

AVERTISMENTELE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE

DE FOLOSIRE ȘI SĂ-L PĂSTRAȚI LA LOC SIGUR.

RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE

- Așezați cântarul pe o suprafață netedă și tare.

O podea moale și neregulată (de ex. covor, linoleum) poate cauza deformarea citirii greutății.

INSTALAREA BATERIILOR

Folosiți doar 2 baterii 1.5V alcaline; Îndepărtați capacul de acoperire al bateriilor din partea de jos a cântarului. Introduceți bateria și reasezați capacul. Înlăturați bateriile descărcate ridicând capacul compartimentului bateriilor, amplasat pe partea dorsală a aparatului. Scoateți bateriile și eliminați-le ca deșeuri speciale, în cadrul punctelor de colectare indicate pentru reciclare. Pentru mai multe informații în legătură cu eliminarea bateriilor descărcate, contactați magazinul de unde ați cumpărat aparatul ce conținea bateriile, primăria sau serviciul local de eliminare a deșeurilor.

Atenție: Pentru mai multă siguranță, nu vă sfătuim să lăsați copiii cu o vârstă mai mică de 12 ani să înlătore bateriile.



- 1. Display Cantar**
- 2. ON/OFF/TARE**
- 3. UNIT**

FUNȚIONAREA TASTELOR

ON/OFF/TARE

Tasta ON/OFF/TARE este utilizată pentru aprinderea și stingerea cântarului.

UNIT SEL.

Apăsați această tastă pentru a selecționa unitatea de măsură dorită: kg, st , lb

Limita maximă de greutate a acestui cântar este de 20 kg

După aprinderea cântarului, afișajul electronic va indica 0.00 kg / 0.00 lb / 0.0 oz.

TARA

Dacă intenționați să așezați copilul pe un prosop sau pe o paturică moale, utilizați funcția TARA.

Porniți cântarul apăsând tasta ON/OFF/TARE.

Așteptați ca afișajul electronic să indice “0.00 kg / 0.00 lb / 0.0 oz”

Pentru stingerea display-ului apăsați tasta ON/OFF/TARE, în caz contrar cântarul se stinge în mod automat după o perioadă de 20 de secunde de neutilizare.

MENTINERE

- Mânuiți cântarul dumneavoastră cu atenție deoarece este un instrument de precizie. În consecință evitați expunerea la temperaturi extreme, umiditate, lovituri, praf sau lumina directă a

soarelui. Nu scăpați scala și nu o loviți.

- Păstrați scala departe de surse de căldură.

- Nu săriți pe cântar

- Curățați platforma cu o cârpă umedă.

- Curățați cântarul doar cu o cârpă moale și pufoasă.

- Pentru a curăța cântarul nu folosiți produse chimice sau abrazive.

- Aveți grijă ca niciun lichid să nu pătrundă în cântar, deoarece nu este rezistent la apă. Nu lăsați cântarul și nu o folosiți în medii prea umede, umiditate mai mare de 85% sau în contact cu apă sau alte lichide ce ar putea cauza coroziune și ar putea pune în pericol precizia

scalei.

Mesaje erori

- “LO” indică că bateriile sunt goale. Înlocuiți - le.

- “O-Ld” indică că greutatea este prea mare.

DATE TEHNICE

Aria de măsurare: 10 g - 20 kg Diviziunea: 10 g

2 x 1.5V seria AAA LR03

Condiții de lucru: +10°C +40°C; umiditate mai mica de RH 80%

Condiții de depozitare: +10°C +50°C; umiditate mai mica de RH 80%

ATENȚIE: Citiți cu grijă instrucțiunile de folosire.

GARANȚIE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului sau data de pe factura de achiziție și/sau de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Această perioadă este în conformitate cu legislația în vigoare și se aplică numai în cazul în care consumatorul este persoană fizică.

Produsele TopCom sunt proiectate pentru uz casnic și nu este permisă utilizarea acestora pentru servicii publice. Garanția acoperă numai defectele de producție și nu este valabilă dacă daunele sunt produse de un eveniment accidental, utilizare greșită, neglijență sau folosire incorectă a produsului. Utilizați numai accesoriile furnizate; utilizarea unor alte accesorii poate duce la anularea garanției. Nu desfaceți aparatul din niciun motiv, dacă îl desfaceți sau dacă îl manevrați,

garanția se anulează automat. Garanția nu se aplică pieselor supuse uzurii din cauza utilizării și din cauza bateriilor când acestea sunt furnizate din dotare. După 2 ani de la cumpărare, garanția expiră; în acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate contra cost.

Fabricantul neagă orice responsabilitate pentru eventualele daune care pot fi cauzate, direct sau indirect, persoanelor, lucrurilor și animalelor de companie din cauza nerespectării tuturor indicațiilor date în manualul de instrucțiuni corespunzător și care privesc în mod special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întreținerii aparatului.