



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Electrozii trebuie plasați pe pacient de către un medic sau de un tehnician ECG.

1. Alegeți locurile pentru plasare după cum se specifică de către protocolul spitalului sau medicului privind monitorizarea sau diagnosticarea prin ECG.
2. Asigurați-vă că locurile de pe piele sunt curățate uscat și nu au păr excesiv. Se recomandă degresarea și o abraziune minoră a pielii pentru testele de stres. Nu utilizați solvenți pentru curățarea pielii înainte de ECG pentru că solvenții prinși sub electrozi pot cauza reacții anormale ale pielii.
3. Conectați cablurile la electrozi.
4. Înlăturați învelișul de plastic și poziționați electrodul pe piele.
5. Neteziți banda, spuma sau orice altă căptușeală cu degetul dacă este necesar.
6. Începeți procedura ECG.
7. Aveți grijă deosebită când înlăturați electrozii de pe o piele extrem de delicată (ex.: a pacienților în vârstă sau după tratamente medicamentoase prelungite, cum ar fi steroizii), pentru a evita rănirea pielii.
8. Păstrați electrozii neutilizați în pungă originală. Închideți pungă deschisă și rulați-o o dată sau de două ori partea de sus a acesteia.
9. Utilizați electrozii în maxim 7 zile de la deschiderea pungii!

PRECAUȚIUNI:

- Folosiți procedurile recomandate de către producătorii de echipament de monitorizare sau pentru electrochirurgie, pentru a minimiza riscul de arsuri pe locurile electrozilor în timpul procedurilor electrochirurgicale.
- Nu plasați electrozii pe piele în locuri cu eritem, leziuni sau orice fel de răni.
- Nu utilizați pe pacienți care prezintă iritații la contactul direct cu electrozii și raportați distribuitorului orice reacții de incompatibilitate.
- Nu utilizați dacă s-a uscat gelul.
- Nu utilizați electrozi timp de mai mult de 72 de ore.
- Electrozii sunt doar de unică folosință.

Daca sunt reutilizați, proprietățile adezive sau electrice ar putea să fie insuficiente. Pe lângă aceasta, există riscul de contaminare încrucișată de la un pacient la altul.

Subsemnata, Cora Silvia Florentina, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și spaniolă, în temeiul autorizației nr. 31732, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat în original a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

