

FIȘĂ INSTRUCȚIUNI

PIPE GUEDEL

REF 34431 Pipă Guedel 40mm

REF 34432 Pipă Guedel 50mm

REF 34433 Pipă Guedel 60mm

REF 34434 Pipă Guedel 70mm

REF 34435 Pipă Guedel 80mm

REF 34436 Pipă Guedel 90mm

REF 34437 Pipă Guedel 100mm

REF 34438 Pipă Guedel 110mm

REF 34383 Pipă Guedel 120mm

REF 34439 Pipe Guedel mixte (1pc REF 34431 + 1pc REF 34432 + 1pc REF 34433 + 2pc REF 34434 + 2pc REF 34435 + 1pc REF 34436 + 1pc REF 34437 + 1pc REF 34438)

UTILIZARE PENTRU UN SINGUR PACIENT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ



STERILE EO

Instrucțiuni de utilizare:

1. Alegeți dimensiunea corectă (dimensiunea corectă pentru un pacient este determinată de distanța dintre colțul gurii și tragus).
2. Lubrifiat și introdus cu curbura înainte, îndreptat în sus și apoi rotit până la jumătate, astfel încât să urmeze curbura limbii.
3. La pacienții edentați, poate fi introdus, de asemenea, direct de la început cu curbura de-a lungul curburii limbii.
4. Odată introdus, este foarte important să susțineți maxilarul pentru a menține permeabilitatea pipei.

Atenție:

- Citiți acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare.
- Acest produs trebuie utilizat de personalul instruit.

Temperatura de depozitare și transport: între -20°C și +60°C (între -4°F și 140°F).

LOT



GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italia - www.gimaitaly.com



MADE IN TAIWAN

CE 0476

M34431-EN-Rev.4-09/18