



dispotech.com

YOUR DISPOSABLE EXCELLENCE

GHEAT Spray DISPO



DISPOZITIV MEDICAL CLASA IIa



INDICAȚII DE UTILIZARE: Folosit pentru calmarea durerii cauzate de traume, contuzii, contuzii sau entorse și în toate cazurile în care este necesară crioterapia și aplicarea gheții. Efectul său anestezic, indus de răcire a zonei cu contuzie, permite o reluare imediată a activității sportive.

MOD DE UTILIZARE: Agitați înainte de utilizare. Pulverizați produsul pe zona afectată, de la o distanță nu mai mică de 20 cm, timp de 3/4 secunde. Dacă este necesar, repetați aplicarea. Anestezia mecanică de la frig elimină temporar durerea.

AVERTIZRI: Aerosol foarte inflamabil. Protejați de razele soarelui și nu expuneți la o temperatură mai mare de 50°C/122°F. Recipient sub presiune. Recipient presurizat care poate exploda dacă este încălzit. Nu perforați și nu ardeți recipientul nici după utilizare. Nu pulverizați peste o flăcără deschisă sau peste alte surse de aprindere, țineți departe de surse de căldură, suprafețe calde, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere, nu fumați. Folosiți produsul în locuri bine ventilate. Evitați acumularea de sarcini electrostatice. Evitați o utilizare excesivă și necorespunzătoare a produsului, pentru a nu crea posibile acumulări de gaz inflamabil. Evitați inhalarea directă și pulverizarea în ochi. Nu aplicați pe pielea cu leziuni. Înainte de a-l pulveriza, asigurați-vă că nu sunteți alergici la substanțe precum mentolul și derivații acestuia. Evitați contactul cu ochii; în cazul în care acest lucru se întâmplă, clătiți cu apă. În caz de boli cardiovasculare, circulatorii, de diabet și/sau insensibilitate cutanată (sindrom Raynaud) utilizați produsul numai după ce ați consultat medicul. Nu lăsați la îndemâna copiilor. În caz de utilizare la nou-născuți, la copii și la persoane vârstnice, consultați medicul înainte de tratament. În cazul în care aveți dubii cu privire la tratamentul pe care urmează să-l efectuați cu acest produs și dacă simptomatologia persistă, consultați medicul. Numai pentru uz extern.

CONȚINUT: Izobutan, propan, butan, mentol.



Dispotech Srl - Via al piano 29
23020 Gordona (SO) Italy
Tel +39 0343/36711 - Fax +39 0343/36567
e-mail: info@dispotech.it - www.dispotech.com



MADE IN ITALY



PERICOL



CE 0546
Cont. **400 ml**
520 3 e



DENUMIRE BUTELIE 207X160

FORMAT BUTELIE / DIMENSIUNE: Ø 65X175 H1													
TIP RIRE INTERIOAR	INEXISTENT												
TIP RIRE EXTERIOAR	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>cyan</td> <td>magenta</td> <td>yellow</td> <td>black</td> </tr> <tr> <td>albastru-verzui</td> <td>magenta</td> <td>galben</td> <td>negru</td> </tr> </table>	1	2	3	4	cyan	magenta	yellow	black	albastru-verzui	magenta	galben	negru
1	2	3	4										
cyan	magenta	yellow	black										
albastru-verzui	magenta	galben	negru										
VOPSEA PE EXTERIOR	Lucioas												

CartoMed
 echipamente medicale si consumabile

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret i traduc tor autorizat pentru limbile str ine italian i englez , în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberat de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba italian în limba român , în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, c textul prezentat a fost tradus complet, f r omisiuni i c , prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET I TRADUC TOR AUTORIZAT
 MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
 MARCU ALINA-BIANCA
 Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
 Limbile Engleză - Italiană