


# ÎN LȚ TOR WC



COD.	H	CU CAPAC
27735	10CM/4"	✓
27737	15CM/6"	✓
27740	15CM/6"	
27741	10CM/4"	

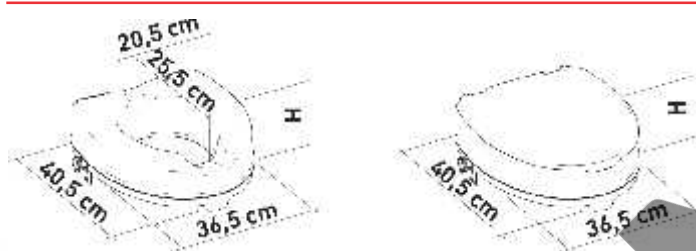

Sarcin maxim :  
550 lb/250Kg



27735	ÎN LȚ TOR WC 10 CM CU CAPAC
27737	ÎN LȚ TOR WC 15 CM CU CAPAC
27740	ÎN LȚ TOR WC 15 CM
27741	ÎN LȚ TOR WC 10 CM

PRIM Med  
echipamente medicale si consumabile

Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și de igienizare, urmați pașii de mai jos:

1. Purtați mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu dezinfectarea foarte atentă.
3. Folosiți apă sau detergent non-agresiv pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.







Alternativ, în lătorul de toaletă poate fi curățat în mașini de spălat vase domestic, la temperatură maximă.

### CERINȚE PRIVIND REUTILIZAREA

Produsul poate fi reutilizat de alți utilizatori. Înainte de reutilizare de către alții, produsul trebuie să fie curățat și dezinfectat în mod corect. Înainte de a transfera produsul altora, produsul trebuie verificat de dealerii calificați.

### PROCEDURA DE ELIMINARE CORECTĂ, CA DE EU:

Nu aruncați produsul în coșul de gunoi cu deșeuri menajere. Întrebați autoritățile locale înainte de a-l arunca, pentru a afla modul corect și prietenos cu mediul în care puteți elimina produsul, ca de obicei.

REF	Cod produs	LOT	Număr de lot
	Dispozitiv medical conform cu Regulamentul (UE) 2017/745		Producător
	Număr de serie		Data fabricației
	Dispozitiv medical		Consultați instrucțiunile de

### CONDIȚIILE DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția Gima B2B standard de 12 luni.

**Toate accidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru unde se află sediul Dvs. social.**

### DOMENIUL DE UTILIZARE:

Produsele sunt proiectate pentru a crește înălțimea vasului de toaletă, cu scopul de a facilita procedurile de așezare și ridicare și de a încuraja independența și a sporii confortul. Versiunile furnizate cu capac asigură condiții de igienă mai bune în timpul acțiunii apei din toaletă.

Capacul poate fi folosit ca scaun când este în poziția închisă.

### INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

În lătorul WC este destinat persoanelor vârstnice, utilizatorilor de scaun rulant, persoanelor cu mobilitate redusă la nivel lombar, de genunchi sau de sold și tuturor celor care ar putea avea dificultăți în așezarea pe și ridicarea de pe vasul de toaletă. Abilitatea de a se putea așeza independent este necesară în timpul utilizării. Nu este recomandat utilizarea în lătorului în caz de tulburări de percepție sau problemă de echilibru în timpul așezării.

### AVERTISMENTE ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ :

- Greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiunile de montare nu trebuie depășită.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că în lătorul este în poziție stabilă pe WC și că este fixat corect pe acesta cu ajutorul accesoriilor speciale de montare furnizate.
- Nu strângeți exagerat sistemul de blocare.
- În timpul asamblării, respectați cu strictețe ceea ce este prezentat în Manualul de utilizare.
- Nu modificați în lătorul sau componentele acestuia, în niciun fel.
- Nu folosiți în lătorul dacă este deteriorat sau modificat în orice fel. Crăpăturile și deformările pot afecta foarte mult prestația și siguranța dispozitivului.
- Asigurați-vă că înălțimea în lătorului este una care asigură utilizarea sa cu ușurință și garantează siguranța utilizatorului.
- În timpul utilizării, evitați pozițiile care mențin greutatea corpului timp prea îndelungat înspre înainte. Pozițiile greșite pot duce la instabilitate și la răsturnarea în lătorului.
- Nu depozitați în lătorul afară, în exteriorul locuinței.

**INFORMAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA:**

Întreținerea produselor constă în procedurile de curățare și igienizare. Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

**REF** 27735 - 27737 - 27740 - 27741

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in Italy

M27735-M4-PB-V0-02\_22



*Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.*

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT  
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat  
MARCU ALINA-BIANCA  
Abt. M.J. Nr. 31329 / 2011  
Limbile Engleză - Italiană

