



PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

CENTURI DE IMOBILIZARE

Toate incidentele grave legate de dispozitivele medicale furnizate de noi trebuie raportate producătorului acestora și autorității competente din statul unde se află sediul Dvs. social.

INTRODUCERE

Prezentul produs este utilizat împreună cu targa la transportul pacienților la urgență.

Are funcție de fixare.

Centura este fabricată din polipropilen.

Materialul butoanelor este POM.

Lungimea centurii poate fi reglată, iar articolul de conectare poate fi desprins rapid.

Capacitatea de încărcare a întregului produs este >60kg.

UTILIZAREA

Desfaceți centuriile de siguranță și fixați pacientul pe o targă, apoi cuplați catarama, reglați lungimea centurii pentru a-l asigura pe pacient în mod corespunzător.

În cazul în care centura este prea largă, reglați în mod adecvat dimensiunea de fixare a acesteia.

AVERTISMENT

În timpul transportului, aveți grijă să urmăriți centura de fixare, să nu fie deteriorată.










În cazul în care centura este prea largă, reglați dimensiunea acesteia în mod corespunzător.

DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI

După fiecare utilizare, vă rugăm să folosiți apă curată sau detergent neutru pentru a curăța mizeria de pe suprafață. Depozitați produsul pentru a se usca și abia apoi refolosiți-l.

Dacă există pete de sânge sau fluide corporale reziduale, vă rugăm să dezinfecțăm produsul cu dezinfectant și să-l curățăm.

SIMBOLURI

	Cod produs
	Atenție: citiți instrucțiunile (avertismente) cu atenție
	Dispozitiv medical
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Producător
	Dispozitiv medical conform cu Regulamentul (UE) 2017/745
	P strați în locuri uscate și răcoroase
	P strați la loc ferit de lumina soarelui
	Numărul lotului

MG4010-IT-GB-Rev.0-02.21

REF 34010 - 34011

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italia
gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Fabricat în China

MD CE



Subsemnata **MARCU ALINA BIANCA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberat de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, conținutul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și/sau adăugiri, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

**INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCUS ALINA BIANCA**

Traducător și Interpret Autorizat
MARCUS ALINA-BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbile Engleză - Italiană