


# EMOCONTROL

## BANDAJ CU COMPRESIE ANTIHEMORAGIC

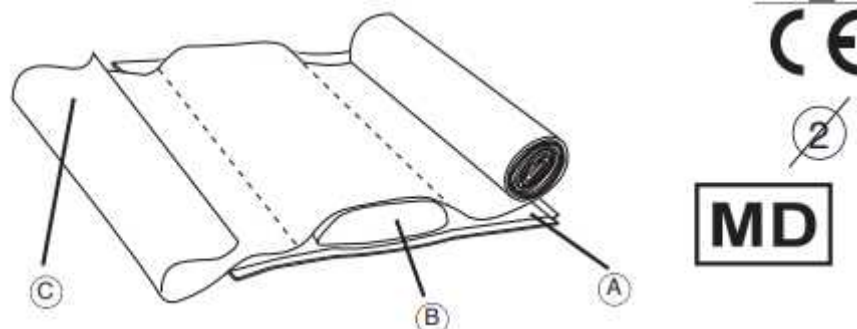

- Bandaj elastic
- Pansament cu tifon
- Tifon absorbant



Țineți bandajul absorbant (A) pe membrul rnit, astfel încât compresele din pansament din tifon (B) să fie deasupra rniei (fig. 1). Înșurați bandajul elastic (C) în jurul membrului astfel încât să comprimați rana. Eliberați sau strângeți fașa în funcție de nevoie. Pentru a evita oprirea circulației sângelui, verificați pulsul la fiecare 10 minute. Fixați bandajul cu clemele aferente (fig. 2).

*Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba italiană în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.*

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT  
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat  
MARCU ALINA-BIANCA  
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011  
Limbile Engleză - Italiană