



## *Manual de Instructiuni*

Decapsator chirurgical pentru piele



CartoMed  
echipamente medicale si consumabile



**ATENȚIE**

**Va rugam sa cititi cu atentie *manualul de instructiuni* inainte de a-l folosi!**

### **1. Structura principala**

Partea metalica a dispozitivului de indepartare este realizata din 1Cr 18Ni9Ti, iar manerul dispozitivului de indepartare este din plastic ABS.

### **2. Principiul de functionare**

Dupa ce manerul a fost impins cu forta exterioara, dispozitivul de taiere superior al decapsatorului forteaza partea de mijloc a acestuia, care se afla pe taietorul inferior al dispozitivului de indepartare. Sub transmisia mecanica a fiecărei piese, doua capete ale decapsatorului trebuie sa fie rasucite pe si in afara suprafetei pielii si asa se inlatura impuritatile din piele.

### **3. Indice de capacitate**

A. Partile metalice ale decapsatorului chirurgical de piele au functia de anti-erodare.

b. Dispozitivul pentru piele este sterilizat cu oxid de etilena.

Resturile de la oxidul de etilena trebuie sa fie mai mici de 10 mg/kg inainte ca acest bun sa paraseasca fabrica.

### **4. Aplicarea**

Decapsatorul chirurgical pentru piele este utilizat pentru a indeparta tergumentele.

CartoMed  
echipamente medicale si consumabile

## 5. Cum se foloseste



A. Introduceti partea din fata a dispozitivului de taiere inferior al dispozitivului de indepartare in partea inferioara a decapsatorului.



b. Prindeti strans manerul superior si inferior pana cand sunt inchise complet. Decapsatorul isi schimba forma.



c. Scoateti din decapsatorul complet neformat vertical de pe suprafata pielii operata.

## 6. Nota importanta:

A. Dispozitivul de indepartat trebuie operat de catre o persoana profesionista care detine certificare medicala.

b. Dispozitivul nu a fost atins sau contaminat pana sa fie scos din ambalaj. Utilizarea lui este interzisa daca pachetul este rupt.

c. Va rugam sa utilizati dispozitivul de indepartare a tergentelor pentru piele doar daca se incadreaza in perioada de valabilitate.

## 7. Pastrarea si transportul

Produsul trebuie pastrat in incaperi cu umiditate relativa <80%RH, fara gaze erozive si cu o buna ventilatie. A nu se depozita sub alte incarcaturi si va rugam sa il manevrati cu grija.

## 8. Perioada de valabilitate

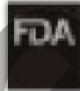
5 ani.

## 9. Service dupa vanzare

Daca aveti vreo reclamatie despre acest produs, va rugam sa contactati furnizorii sau producatorii.

## 10. TERMENII DE GARANTIE GIMA

Se aplica garantia standard B2B Gima de 12 luni.

	Cod produs		Numar lot
	Dispozitivul medical este conform cu Reglementarile 93/42/EEC		Producator
	Dizpozitiv de unica folosinta, a nu se re-folosi		Data fabricarii
	A se pastra intr-un loc racoros siu scat.		Limita de umiditate
	Representant autorizat in Comunitatea Europeana		Data fabricarii
	A se feri de lumina solara		Cutia se va tine cu aceasta parte in sus
	Sterilizat cu oxid de etilena		Fragil, manipulate cu grija
	Atentie: cititi instructiunile / atentionarile cu atentie		Consultati instructiunile de folosire
	 ADMINISTRATIA PENTRU ALIMENTE SI MEDICAMENTE		

 <b>C-W (25892)</b>	
	Ningbo Advan Electrical Co., Ltd. Zona de Dezvoltare Industriala Orasul Fuhai 315332 Municipiul Cixi, Ningbo, Provincia Zhejiang REPUBLICA POPULARA CHINEZA Fabricat in China
	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffelstrarse Nr. 80 20537 Hamburg GERMANIA
Importator Gima S.p.A. – Via Marconi, Nr. 1 20060 – Gessate (MI) – Italia <a href="mailto:gima@gimaitaly.com">gima@gimaitaly.com</a> – <a href="mailto:export@gimaitaly.com">export@gimaitaly.com</a> <a href="http://www.gimaitaly.com">www.gimaitaly.com</a>	
M25892-M-Rev.2.10.21	

*Subsemnatul Oprea Lucian Gabriel traducator autorizat pentru limba Engleza in temeiul autorizatiei nr.1804 din data de 25.07.2018, certifice exactitatea traducerii efectuata din limba Engleza in limba Romana, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca prin traducere, inscrisul nu i-a fost denaturat continutul si sensul.*

OPREA LUCIAN  
TRADUCATOR  
AUTORIZAT

SERIA E  
NR 1804



Cartomedia  
echipamente medicale si consumabile