

Traducere autorizată din limba engleză în limba română



Gima S.p.A. – Via Marconui, 1 – 20060 Gessate (MI) Italia
Italia: tel. 199400401 – fax 199400403 – Export: tel. +39 02
953854209/221/225 fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com –
www.gimaitaly.com

PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE


CRANIOMETRU

Manual de utilizare

ATENȚIE: Utilizatorii trebuie să citească și să înțeleagă deplin acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul.

M27327-M-Rev.5-02.19


REF 27327

 Metrica S.p.A.,
Via Grandi n.18
20097 San Donato (MI) - Italia

CE 0476



cod. 27327

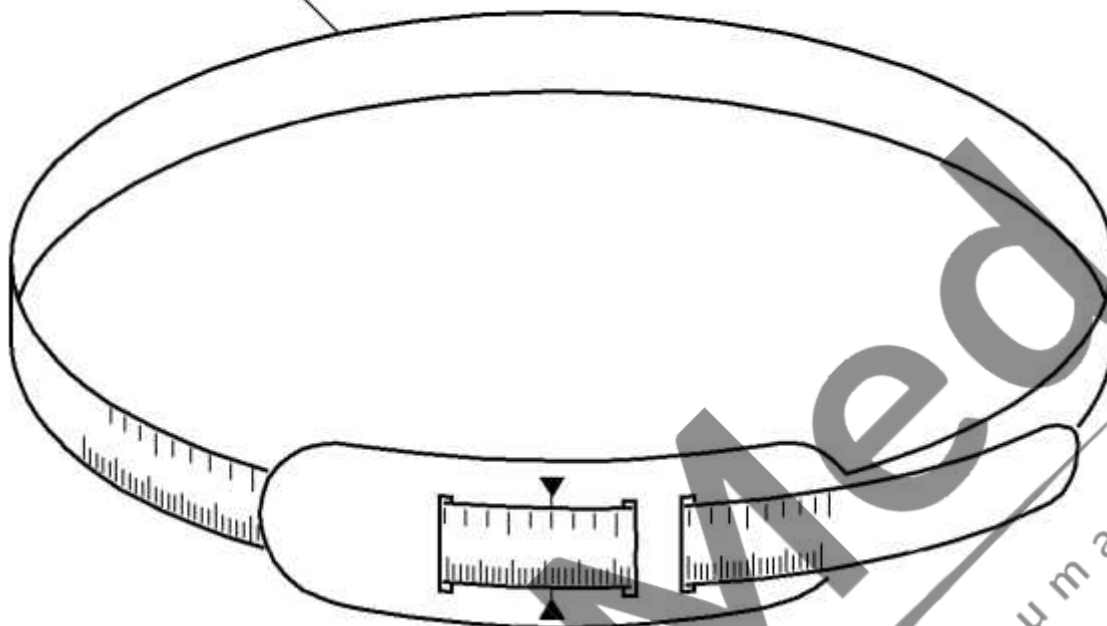

CARACTERISTICI

Descrierea produsului

Dispozitivul de măsurare a capului de la GIMA (cod.27327) este un instrument adecvat măsurării în mm a diametrului și a circumferinței capului copilului, cu o aproximație de ± 2 mm pentru o circumferință de până la 60 cm.

Este fabricat dintr-un material special, moale și extensibil.

RECOMANDĂRI

Prevenirea accidentelor

Produsul va fi folosit exclusiv de personalul calificat.



Nu folosiți echipamentul în cazul în care este deteriorat. Adresați-vă vânzătorului.

Evitați reparațiile precare. Reparațiile vor fi efectuate numai cu piese de schimb originale, care vor fi instalate conform domeniului de utilizare.

Dat fiind că produsul este fabricat din materiale rezistente la coroziune adecvate condițiilor ambientale prevăzute pentru utilizarea sa normală, acestea nu necesită o îngrijire specială; cu toate acestea, este necesar să-l depozitați într-un loc închis, asigurându-vă că este protejat de praf și de mizerie, pentru a-i asigura condițiile de igienă. Mai mult decât atât, se recomandă depozitarea produsului într-un loc care poate fi ușor accesat de personalul corespunzător în caz de nevoie.

TRANSPORTUL

Dezambalarea



Rețineți faptul că elementele de ambalare (hârtia, celofanul, capsele, benzile adezive etc.) pot să dăuneze și/sau să provoace răni dacă nu sunt manipulate cu grijă.

Acestea vor fi îndepărtate cu mijloacele adecvate și nu vor fi luate la îndemâna persoanelor iresponsabile; același lucru este valabil pentru uneltele folosite la îndepărtarea ambalajelor (foarfece, cuțite etc.).

După deschiderea ambalajelor, mai întâi, este necesar să verificați toate piesele și părțile care alcătuiesc produsul. Verificați ca acestea să fie toate prezente și în stare perfectă.

UTILIZAREA

Instrucțiuni de utilizare

Destindeți complet craniometrul și introduceți capul terminal în deschiderile corespunzătoare, cu ajutorul degetului arătător.

Țineți degetul arătător îndreptat spre exterior (vezi imaginea).

Craniometrul este foarte ușor de folosit. Puneți-l pe capul copilului și trageți foarte ușor vârful proeminent până când acesta se apasă în jurul frunții. Citiți valorile indicate de scara de pe partea frontală a craniometrului.

ÎNTREȚINEREA

Instrucțiuni generale de întreținere

Produsul a fost conceput pentru a dura foarte mult timp; este rezistent la cea mai mare parte a substanțelor chimice, cu excepția metil etil cetonei (M.E.K.), a diluanților și a acetonelor.



Pentru a curăța instrumentul, asigurați-vă că folosiți o cârpă umezită în dezinfectant.

GARANȚIA

Condiții generale de garanție

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru.

Acest produs îndeplinește cerințele privitoare la selecția materialelor calitative de fabricare și, de asemenea, la controlul final. Produsul are o garanție de 12 luni, valabilă de la data la care este livrat de GIMA.

În timpul perioadei de garanție, vor fi asigurate reparațiile gratuite și/sau înlocuirea oricăror piese cu defecte de fabricație, însă cheltuielile cu manopera, taxele potabile, transportul și ambalarea nu sunt incluse. Garanția exclude, așadar, bateriile, electrozii, piesele de mână, piulițele și ambalajele, rezistențele etc.








Nu se va acorda nicio despăgubire pentru pierderea dreptului de utilizare a produsului.

Mai mult decât atât, înlocuirile sau reparațiile efectuate în timpul perioadei de garanție nu prelungesc durata garanției.



Această garanție este nulă în caz de: reparații efectuate de persoane neautorizate sau cu piese de schimb care nu sunt aprobate de GIMA, în caz de deteriorare sau defecțiuni ale produsului cauzate de neglijență, loviri, utilizare anormală a dispozitivului sau instalarea necorespunzătoare.

Garanția va deveni nevalidă dacă numărul de înregistrare a fost îndeplinit, pierdut sau modificat. Dispozitivele defecte trebuie returnate numai vânzătorului de la care acestea au fost cumpărate. Orice articol expediat direct către noi va fi refuzat.

| Simboluri | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
|  | P strazi în locuri uscate și r coroase |  | P strazi ferit de lumina soarelui |  | Produc tor |  | Citiți manualul de instrucțiuni |
|  | Produs conform cu Directiva European |  | Cod produs |  | Num r lot (vezi cutie / ambalaj) | | |

CartoMed
 echipamente medicale și consumabile

NOTE

CartoMed
echipamente medicale si consumabile

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
MARCU ALINA-BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbile Engleză - Italiană

CartoMed
echipamente medicale și consumabile