



PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

MONOFILAMENT


Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru unde este înregistrat sediul Dvs. social.



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



31282

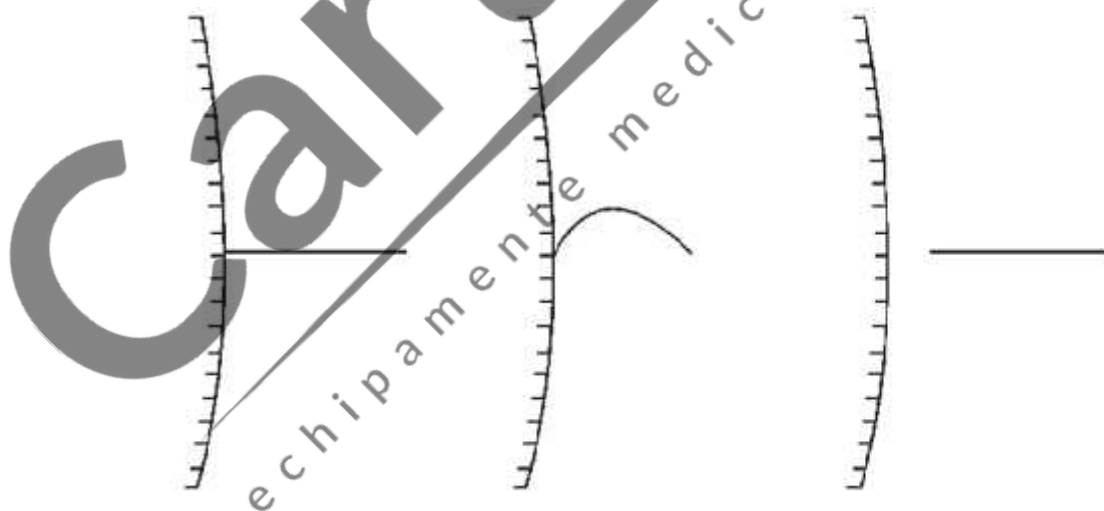

IMAGINEA 1

IMAGINEA 2

IMAGINEA 3

DREPT



STÂNG

MONOFILAMENT

Arătați-i pacientului filamentul și atingeți-l de mână sau de brațul lui/ei, astfel încât să simtă că nu doare.

Folosiți filamentul de 10 grame pentru a testa senzațiile în locurile indicate pe fiecare picior, conform imaginii. Aplicați filamentul de-a lungul perimetrului și NU direct pe un țesut cu ulcer, calus, cicatrice sau țesut necrotic.

Monofilamentul este un instrument pentru diagnosticarea preliminară a neuropatiei senzoriale, care poate fi cauzată, spre exemplu, de diabet. Lăba piciorului este una dintre părțile corpului care sunt afectate de deteriorările cauzate de neuropatie, când percepția senzorială periferică este compromisă; monofilamentul poate detecta abilitatea unui pacient de a percepe presiuni moderate.

MONOFILAMENTUL se îndoaie la o presiune de 10 grame de cel puțin 50/60 de ori înainte de a se îndoi la o forță mai mică; se recomandă înlocuirea firului după utilizarea acestuia la 6/15 pacienți și înlocuirea acestuia în repaus, neutilizându-l, timp de cel puțin 24 de ore înainte de a fi reutilizat. Monofilamentul poate funcționa optim la o temperatură de 20/26°C, cu o umiditate de 30/50% fără deformare. La temperaturi mai mari de 33°C și cu o umiditate de 80%, filamentul se poate deforma, iar diagnosticul este mai puțin precis. Filamentul a fost testat pentru determinarea preciziei la o îndoire la 10 grame, iar forța de deformare a fost stabilită la +/- 10%. Înlocuiți obligatoriu filamentul după 150/200 de îndoiri.

Țineți filamentul exercitând o presiune moderată perpendicular pe piele și acționați cu o mișcare ușoară când efectuați testarea.

Țineți filamentul perpendicular pe piele și acționați cu o mișcare ușoară când efectuați testarea. Folosiți o secvență în 3 pași, care include (1) atingerea pielii, (2) îndoirea filamentului, și (3) ridicarea de pe piele (Vezi Figurile 1-3). Nu folosiți mișcări rapide. Aproximativ 1,5 secunde de contact cu aceasta și îndepărtarea trebuie să dureze aproximativ 1,5 secunde.

Cereți pacientului să răspundă cu "da" când simte filamentul. Dacă pacientul nu răspunde când atingeți un anumit punct de pe lăba piciorului, continuați în alt punct.

Dup ce ați încheiat această secvență, REPETAȚI pe zona/zonile unde pacientul nu a indicat că ar fi simțit filamentul.
Folosiți filamentul într-o secvență aleatorie.










PIERDEREA SENZAȚIEI DE PROTECȚIE ÎN ORICARE DINTRE CELE OPT LOCURI (indicate în diagrama de mai sus) INDICĂ UN PICIOR CU RISC FOARTE CERCSCUT.

Se recomandă dezinfectarea produsului după fiecare utilizare la un pacient, folosind un dezinfectant antibacterian non-alcoolic.

TERMEN DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard B2B de la Gina, de 12 luni.

M31282-M-Rev.7-12/21

	Cod produs
	Număr lot
	Protejați în locuri răcoase și uscate
	Protejați în locuri ferite de lumina soarelui
	Producător
	Dispozitiv medical conform cu regulamentul (UE) 2017/745
	Data fabricației
	Dispozitiv medical
	Consultați instrucțiunile de utilizare

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
MARCU ALINA-BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbi Engleză - Italiană



CartoMed
echipamente medicale și consumabile