



Datele noastre:
CARTO PLAST SRL / RO22847422 / J40/22553/2007
B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA, NR 105, BUCURESTI
FAX: 0338816225 / EMAIL : OFFICE@MEDWEB.RO
TEL: 0770 306 695 / 0772 100 641



Instructiuni de utilizare

Debitmetru/Regulator oxigen cu adaptor metalic DIN si borcan umidificator
Cod produs : BO1

1. Se desface produsul din ambalaj ;
2. Se strange conectorul metalic / adaptor de tip DIN astfel incat acesta sa inchida etans prin strangere pe garnitura dar in acelasi timp sa se potriveasca cu priza dvs de oxigen, pastrand debitmetru in pozitia verticala pentru o utilizare usoara.
3. Se ajusteaza/strange piulita de la capacul borcanului cu rol de umidificare a oxigenului (din interior) pentru o pozitionare fixa fata de debitmetru.
4. Debitmetrul se conecteaza cu borcanul umidificator ce contine compozitia de umidificare intre limitele minim si maxim (recomandat minim).
5. La borcanul umidificator se conecteaza canula nazala ce este de asemenea pozitionata la pacient.
6. Se roteste de robinet in sens invers al mersului ceasului pentru a seta robinetul (pentru a seta doza de oxigen recomandata de medic) sau in sensul orelor de ceas pt a inchide robinetul.
7. Sterilizarea borcanului si a capacul se efectueaza separat pentru a permite sterilizarea in interiorul componentelor (la 121 de grade).

Atentie! Debitmetrul si conectorul DIN nu se sterilizeaza, decat capacul borcanului si borcanul.

Cu stima,
Gheorghe Samoila