

**STETOSCOP**  
**Model: LD-PROF PLUS**  
**Manual de utilizare**



## PARTI SI COMPONENTE

1. Cap stetoscop.
2. Membrana pentru stetoscop.
3. Inel din plastic.
4. Tub medical de conexiune cu arc intern si tub binaural incorporat.
5. Olive auriculare.
6. Placuta de identificare.
7. Set suplimentar de accesorii.
8. Manual de utilizare
9. Certificat de garantie.

## INFORMATII GENERALE

Stetoscopul LD Prof Plus este un dispozitiv cu care se pot efectua masuratori respectand metoda Korotkov.

Geometria speciala a capului si a materialului membranei face posibila scoaterea in evidenta a sunetului in timpul ascultarii pana la un interval mediu, ceea ce este deosebit de important in timpul ascultarii sunetelor inimii.

Frecventa caracteristica a stetoscopului in intervalul 200-500 Hz are sensibilitate – ceea ce este unic pentru stetoscoapele din aceasta clasa.

LD Prof Plus are un sistem acustic de inalta calitate de transmisie acustica de la membrana pana la urechea medicului.


Capul stetoscopului continua cu tubul de conexiune cu arc intern si un tub binaural care se separa in doua tuburi de transmitere a sunetului, pentru fiecare ureche in parte.

Ambele conducte ale sunetului sunt integrate intr-unul singur pentru a exclude frecarea sunetului unul de altul.

Materialul tubului de conducere a sunetului, rigiditate optima a olivelor oriculare atasate si precizia conectarii partilor stetoscopului exclude la maximum orice zgomot, atat exterior, cat si cel produs in timpul utilizarii.

Dimensiuni: 230 x 120 x 22 mm

Greutate: 76 g

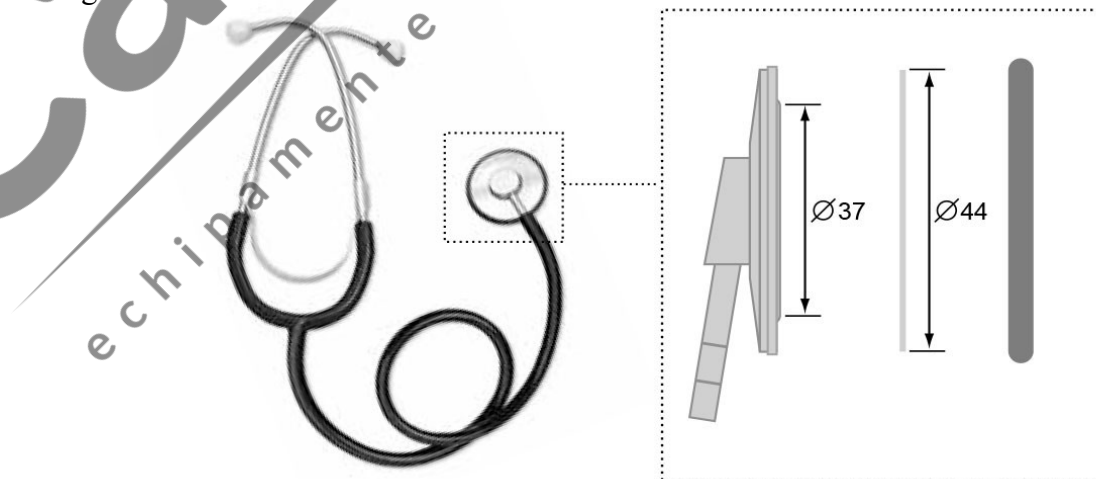

## **INTRETINERE, DEPOZITARE, REPARARE SI RECICLARE**

1. Dispozitivul nu trebuie expus la umiditate ridicata, lumina directa a soarelui, socuri sau vibratii.
2. Nu depozitati aparatul langa surse de caldura sau foc deschis.
3. Nu contaminati dispozitivul.
4. Nu permiteti ca aparatul sa intre in contact cu apa, solventi, alcool sau benzina.
5. Produsul se repara doar in centrele autorizate.
6. Dupa expirarea garantiei se recomanda verificarea periodica a produsului de catre un personal specializat pentru verificarea conditiei dispozitivului.
7. Urmati regulile locale si nationale cu privire la colectarea deseurilor.
8. Conditii de operare: +10°C - +40°C; umiditate relativa: 85% sau mai putin
9. Conditii de depozitare: -34°C - +50°C; umiditate relativa: 85% sau mai putin.

## **CONDITII DE GARANTIE**

1. Garantia pentru stetoscop este de 24 luni.
2. Conditiiile de garantie sunt comunicate cumparatorului pe certificatul de garantie.
3. Pentru validarea garantiei este necesara prezentarea certificatului de garantie.

Producatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice in interesul progresului fara preaviz. Preavizele nu vor fi oferite pentru a modifica acest manual.

Producator: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., LTD, No.8, Tongxing Road, Economic&Technical Development Area, Nantong City, Jiangsu, P.R.CHINA

Distribuitor autorizat in EU: Shanghai International Trading Corp. GmbH, Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY