

SleepAngel® produse medicale

Instrucțiuni de curățare și îngrijire pentru perne

Produsele SleepAngel® sunt gata pentru utilizare imediată. Produsul nu este sterilizat.



- Așteptați să se usuce.
- Produsul este acum gata de utilizare

Notă:

- Evitați frecarea abrazivă a filtrului și a țesăturii.
- Nu folosiți înălbitor, nu spălați în mașina de spălat, nu curățați chimic, nu folosiți uscătorul automat și nu călcați produsul.



Folosirea șervețelelor îmbibate cu alcool și a soluțiilor de curățare poate modifica temporar suprafața țesăturii învelitoare.

3. Instrument de control

Scoateți perna din învelitoare detașabilă (dacă există) și verificați următoarele:

- Filtrul să nu fie compromis
- Cusăturile să fie intacte
- Perna să nu fie pătată
- Perna să nu prezinte uzură vizibilă sau deteriorări
- Perna să nu aibă un miros neplăcut
- Miezul pernei este ridicat și rezistent

Dacă oricare dintre cele de mai sus nu se verifică, perna nu a trecut testul de control și trebuie înlocuită.

4. Depozitare și instrucțiuni de citire LOT

- Perna poate fi depozitată în siguranță, plată sau pe lateral. Nu îndoiți perna; acest lucru ar putea deteriora filtrul PneumaPure®.
- Nu așezați greutatea pe produse.
- Depozitați într-o încăpere uscată, la o temperatură de +10...+30°C.

Instrucțiuni de citire a LOT-ului

Exemplu LOT 11110722:

- 1111 – numărul de fabricație
- 07 – luna fabricației
- 22 – anul

5. Eliminarea, ca deșeu, și reciclarea

Pentru a elimina perna, ca deșeu, tăiați perna și scoateți umplutura acesteia. Aruncați-le pe ambele în recipientul cu deșeuri medicale.

1. Domeniul de utilizare/tehnologia

Produsele SleepAngel® sunt închise ermetic:

- Protecție material PureShield: materialul textil durabil, moale la atingere și de înaltă performanță blochează contaminanții. Permeabil la vapori și rezistent la apă.
- Cusături SafeWeld: cusăturile etanșe asigură o barieră completă – fără găuri de la cusături.
- Filtrul PneumaPure®: Filtrul mecanic, permeabil la aer, permite fluxul de aer curat în pernă, însă blochează patogenii și alergenii.

2. Inspectarea și curățarea

Înainte de utilizarea produsului:

- Curățați produsul (vezi mai sus)
- Inspectați vizual cusăturile produsului, husa/țesătura și filtrele, pentru a depista deteriorări sau găuri. Un produs cu găuri sau cu țesătura sau filtrul deteriorate este contaminat și trebuie aruncat.

Utilizarea de zi cu zi:

- Inspectați vizual cusăturile, țesătura și filtrele produsului, pentru a vedea dacă este deteriorat sau găurit.
- Un produs găurit sau cu țesătura sau filtrul deteriorate trebuie aruncat.
- Curățați perna cel puțin o dată pe săptămână, după fiecare externare a unui pacient sau când este murdară.
- Pernele trebuie să fie înfioate pentru a păstra calitatea pufoasă a fibrelor.
- Asigurați-vă că toți agenții de curățare și dezinfectare folosiți sunt conformi cu indicațiile producătorilor.
- Curățați cu detergent delicat și cu soluție de apă.

Gabriel Scientific OÜ

Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia

Tel: +372 56605967 www.SleepAngel-Medical.com info@SleepAngel-Medical.com

SleepAngel.

SleepAngel® produse medicale

Instrucțiuni de curățare și îngrijire pentru perne

Produsele SleepAngel® sunt gata pentru utilizare imediată. Produsul nu este sterilizat.

Produse de curățare și dezinfectare care pot fi folosite:

- Soluție peroxid de hidrogen 1%
- Compuși amoniu
- Aniospray Quick
- Antifect extra
- AntiGone
- Bacillol AF
- Spumă Bacillol
- Șervețele Bactericide
- Șervețele Chemisept
- Soluție de dioxid de clor, 10.000 ppm (permisă a fi folosită în caz de murdării dificile, curățați cu o cârpă umedă după utilizare)
- Soluție de dioxid de clor, 1000 ppm
- Soluție cu eliberare de clor, 1000 ppm
- Șervețele cu alcool Clinell
- Șervețele sporicide Clinell
- Spray universal Clinell
- Produs de curățare decontaminare suprafețe Cavi Cide
- Șervețele Cavi
- Descosept PUR Șervețele RTU
- Ecopine, (5% Soluție în apă)
- Incidin Foam & Incidin Plus
- Incidin OxyFoam S
- Incidin OxyWipes
- Incidin Pro
- Alcool izopropilic, %70
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Mikrozyd AF Liquid
- Lichid sensibil Mikrozyd
- Șervețele sensibile Mikrozyd
- Oxivir Plus
- Perform 1% și 3%
- Soluție de fenol, %1
- Șervețele PDI Sani Cloth AF3
- Pursept AF
- Rely+ON Perasafe
- Rely+ON Virkon
- Sani-Cloth Active
- Spray Off

- Șervețele Sterisept
- Șervețele de unică folosință germicide Super Sani Cloth
- Terralin® protect (max. 4%)
- TPH Protect
- Virusolve (5% & 10% Soluție în apă)
- Șervețele umede

Notă: După utilizarea agenților de curățare care conțin clor, se recomandă curățarea suprafețelor cu o cârpă umedă, deoarece clorul poate deteriora suprafața țesăturii husei produsului în caz de utilizare îndelungată și o poate face mai sensibilă la deteriorările mecanice.

Produse de curățare și dezinfectare nerecomandate a fi utilizate:

- Disclean ENDO PAA (Soluție Acid Peracetic)
- Șervețele de unică folosință germicide cu înălbitor PDI Sani-Cloth
- Acid Peracetic

Această listă nu este exhaustivă.

Urmați cu strictețe și nu depășiți concentrațiile prezentate în instrucțiuni.



Gabriel Scientific OÜ

Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia

Tel: +372 56605967 www.SleepAngel-Medical.com info@SleepAngel-Medical.com

SleepAngel.