

Transept Spray

Solutie de curatare a sondelor / traductoarelor ecografului. Sprayul cu utilizare multipla pentru curatarea profesionala a suprafetelor traductoarelor (sondelor) intre procedurile medicale. Dezinfectantul este incolor, avand un miros de alcool.

Instructiuni de utilizare :

- este gata de utilizare
- inlaturati capacul
- pulverizati traductorul ultrasunet de doua ori;
- dupa procedura medicala, luati un servetel de hartie si stergeti traductorul;
- repetati procedura dupa fiecare pacient, pentru mentinerea sterilizarii;
- dupa fiecare pulverizare puneti capacul recipientului;

Atentie:

- inchideti sticla dupa utilizare
- contactul cu ochii pot crea iritatii;
- daca utilizatorul ecografului are pielea sensibila, este recomandat ca acesta sa poarte manusi in timpul procesului;
- nu folositi sprayul dupa data de expirare inscriptionata pe ambalaj.

Ingrediente:

Alcool isopropilic, apa, propilen glicol, gluconat de clorhexidină,

Impachetare:

Produsul este ambalat in flacon: 250 ml / flacon (35 buc / cutie)

Conditii de reciclare/eliminare

Recipientul folosit trebuie reciclat in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare.

Conditii de pastrare

Sprayul Transept trebuie pastrat in locuri intunecoase, la temperatura camerei, evitand plasarea langa sursa de caldura sau flacara.

Produsul este sensibil la expunerea directa la soare si raze UV.

Termen de valabilitate

36 de luni de la data productiei